

Contrôlez votre glycémie à l'aide de TRUEresult *twist*

Des étapes simples pour tester votre glycémie



1

Lavez-vous les mains à l'eau tiède et au savon.



2

Retirez une bandelette réactive du flacon et refermez-le immédiatement. Insérez la bandelette réactive dans la fente d'insertion (contacts vers le haut). Le lecteur se met en marche.



3

Piquez le bout de votre doigt.



4

Laissez une goutte de sang se former, mettez l'extrémité de la bandelette au contact de la goutte de sang jusqu'à ce que des tirets apparaissent à l'écran.



5

Le résultat de la glycémie s'affiche en 4 secondes à peine.



6

Maintenez le lecteur à la verticale avec la bandelette réactive orientée vers le bas. Appuyez sur le bouton de libération de la bandelette pour retirer la bandelette réactive usagée du lecteur.

Ce guide donne un bref aperçu de la procédure de test de la glycémie. Pour de plus amples renseignements sur la procédure complète de test de la glycémie, consultez la rubrique « Tester votre sang » dans le manuel d'utilisation.



Distribué par:
NOVALAB France
14 Rue Avaulée
92240 Malakoff
France



© 2009 Home Diagnostics, Inc.
F41FR08 Rev. 1

EC REP AR-MED, A Division of Quintiles LTD
Runnymede Malthouse Business Centre, Off Hummer Road
Egham, Surrey TW20 9BD United Kingdom



T'chat audio-vidéo de l'association « Dextro en Fête » sur www.dextro.fr

Réseau de diabétiques sur www.lasdepic.fr

